



FICHE TECHNIQUE

Code article : FG3231T8

L/10 PAIRE ULTRANITRIL 454 T8 GANT TURQUOISE

<p>L/10 PAIRE ULTRANITRIL 454 T8 GANT TURQUOISE</p> <p>ULTRANITRIL 454</p>	 
--	--

AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

Domaines d'utilisation : Collectivités, Santé

Finesse de toucher exceptionnelle : qualités du matériau de synthèse spécifique MAPA

Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant

Confort optimum : forme anatomique, nouvelle qualité de flockage

CARACTÉRISTIQUES

Catégorie 3 - EN 420 5/5 – EN 388 2 sur 4 à l'abrasion – EN 374-5 contre bactéries champignons et virus – EN 374 -1 type B

Matière : Elastomère synthétique

Finition : Sans poudre

Longueur : 310 mm

Couleur : Bleu turquoise

Bord : Droit

Existe en 5 tailles : XS -S – M – L - XL

CONDITIONNEMENT : 1 paire par sachet – 50 paires au carton

CONSEIL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

UTILISATION :

Usages courants en hôpitaux et cliniques et manipulation de détergents ménagers

CONSEIL DE STOCKAGE ET UTILISATION :

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et aux thiazoles.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer ausite internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.
- En utilisation avec un liquide, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur.

Conditions de lavage

- Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
- Utilisation avec des solvants (alcool, etc...) : essuyer avec un chiffon sec
- Utilisation avec des détergents, acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon sec.
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage non recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

STOCKAGE :

A l'abri des températures extrêmes

Mis à jour le 12 mars 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>